

結果・処置記号		
良 V	清掃 W	交換 P
不良 F	調整 A	修理要 R

心電計
ECG-1400シリーズ
点検記録表

発行No. _____

施設名 中央病院			設置場所 検査			御住所(TEL)			検収印 河野		
型式 ECG-1450			本体No. 2164			納入 年 月 日				御担当	
部位	番号	点検項目		結果	処置	部位	番号	点検項目		結果	処置
外観	1	装置外装に、破損・汚れはないか		✓	W	システムテスト	24	記録スピードは正常か		✓	
	2	表示画面の清掃		✓	W		25	マーク検出はするか		✓	
	3	スイッチの感触は良いか		✓			26	タッチパネルは正常か		✓	
	4	マガジンゴムローラの清掃		✓	W		27	LCDの画質品質は正常か		✓	
	5	記録紙装填ボタンを押し上げ、マガジンロックの感触はあるか		✓			28	LCDのカラーパターンは正常か		✓	
内部	6	サーマルヘッドの清掃		✓	W		29	LCDのバックライトは正常に点滅するか		✓	
	7	紙切れ検出センサの清掃		✓	W		30	LED表示は正常か		✓	
	8	マーク検出センサの清掃		✓	W		31	操作パネルのすべてのスイッチは正常に動作するか		✓	
アンブ	9	バッテリーパックは使用期限内か		✓			32	スピーカーは正常に動作するか		✓	
	10	感度は規格内か		✓			33	心電図表示は正常か		✓	
制御部	11	時定数は規格内か		✓		34	装置内部のメモリは正常か		✓		
	12	マニュアル操作はできるか		✓		35	PCカードを読み込めるか		✓		
	13	オート操作はできるか		✓		36	IDカードリーダーは正常か		✓		
	14	紙送りキーは正常に動くか		✓		37	フロッピーディスクユニットは正常か		✓		
	15	紙の蛇行はないか		✓		38	バーコードリーダーが正しく動作するか		✓		
	16	紙切れ検出機能は正常か		✓		接地漏れ電流 正常状態		48 μA	✓		
	17	電極はずれ検出機能は正常か		✓		同上 単一故障状態		165 μA	✓		
表示部	18	明瞭度(明るい場所でも視認できるか)		✓		外装漏れ電流 正常状態		1 μA	✓		
	19	電源コードに異常はないか		✓		同上 単一故障状態		28 μA	✓		
電源	20	アース配線の良否		✓		患者漏れ電流 I 正常状態		1 μA	✓		
	21	印字品質		✓		同上 単一故障状態		2 μA	✓		
システム	22	ドット抜けはないか		✓							
	23	基線幅は正常か		✓							
測使用計	品名	管理No.(製造No.)		品名	管理No.(製造No.)	品名	管理No.(製造No.)				
	AX-4105	011111 (95) 2010									
構成機器							付属品・消耗品				
							品名		数量		
							K073		1		
御申し出事項											
処理事項 点検票に基づいた総合動作点検を実施 清掃、ICカード、ICカードの交換											
未処理事項											
							使用状況				
							使用法: 連続・間欠				
							使用年数: 年				
							使用者: 看護師・医師・技師				
総合判定						特記事項					
<input checked="" type="checkbox"/> 異常なし。このまま御使用ください。 <input type="checkbox"/> 使用に差し支えありませんが、日程を決めて修理して下さい <input type="checkbox"/> 使用上問題がありますので、緊急に修理して下さい											
点検日			作業時間			作業者		承認			
2021年2月17日			始時 分 終時 分			河野		2021.2.17 河野 尚			
会社名						緊急連絡先					
国光電気工業(株) A112-14						0120-49-0990					
住所											